



TECH INTER

ZA DU CLOS DE VILLARCEAUX

78770 THOIRY

Tél : 01 34 94 20 45

Email : sales@techinterlab.fr

GESTION SECURISEE DU FORMOL DANS LE BLOC OPERATOIRE

LES DIFFERENTES CONFIGURATIONS POSSIBLES POUR REpondre AUX EXIGENCES NORMATIVES EN VIGUEUR

SAS TECH INTER ZA du Clos de Villarceaux. 78770 Thoiry. France.

Tél : 33 (0)1 34 94 20 40. Fax : 33(0)1 34 87 76 49. Email : sales@tech-inter.fr. site : www.tech-inter.fr
Siret n° : 39312254400058 – APE : 4652Z RCS Versailles : B393122544 N° TVA intracom : FR313931244544

CONFIGURATION TISSUE FILLING EASY

EQUIPEMENT REQUIS POUR GERER TOUS LES ECHANTILLONS :

- **1 AUTOMATE TISSUE FILLING EASY POUR LES GROS ECHANTILLONS**
(500ml, 1000 ml, 3000 ml et 5000 ml)
- **FLACONS ZERO POUR LES PETITS ECHANTILLONS**
(60 ml ET 150 ml)
- **1 ARMOIRE DE STOCKAGE VENTILEE POUR LES FLACONS AVEC ET SANS ECHANTILLON**

REQUIS TECHNIQUES POUR INSTALLATION :

APPAREIL	DIMENSIONS	VENTILATION	EVACUATION EXTERNE	PIQUAGE	COMPENSATION	ELECTRICITE
TISSUE FILLING EASY	L650 x P 990 x H 1350		OUI (via l'armoire avec une gaine D150 mm)	Sur l'armoire	NON	1 PRISE 16A 220v
ARMOIRE STOCKAGE	L 620 à 1500 x P 600 x H 1000/1900 mm	100 à 150 m3/h	OUI	150 MM	NON	NON (sauf si caisson de ventilation fournit par TECH INTER, 1 PRISE 16 A 220 V)

**Le TISSUE FILLING EASY est raccordé sur l'armoire.
L'armoire est raccordée sur une évacuation externe D150 mm
Le client fournit le piquage en attente (en faux plafond ou mural)**

CAISSON D'EXTRACTION :

Fournit par TECH INTER (en option) ou par le client.

SAS TECH INTER ZA du Clos de Villarceaux. 78770 Thoiry. France.

Tél : 33 (0)1 34 94 20 40. Fax : 33(0)1 34 87 76 49. Email : sales@tech-inter.fr. site : www.tech-inter.fr
Siret n° : 39312254400058 – APE : 4652Z RCS Versailles : B393122544 N° TVA intracom : FR313931244544

FILTRATION :

Le TISSUE FILLING EASY est équipé d'un filtre formol et d'un préfiltre (filtre HEPA en option) à remplacer 1 fois par an. L'armoire est équipée d'un filtre Formol à remplacer 1 fois par an.

CONNECTIVITE :

Le TISSUE FILLING EASY peut être connecté sur le Système Informatique de l'établissement.

Nous recommandons également de prévoir une paillasse à proximité du T Filler pour faciliter les manipulations des seaux.

CONSOMMABLE :

Le TISSUE FILLING EASY est un automate avec consommable captif pour :

- Les seaux
- Les étiquettes


MAINTENANCE TISSUE FILLING EASY :

Le fabricant recommande une maintenance préventive annuelle. Le coût global de cette maintenance préventive dépend du site d'intervention.

TISSUE FILLING EASY



ARMOIRE

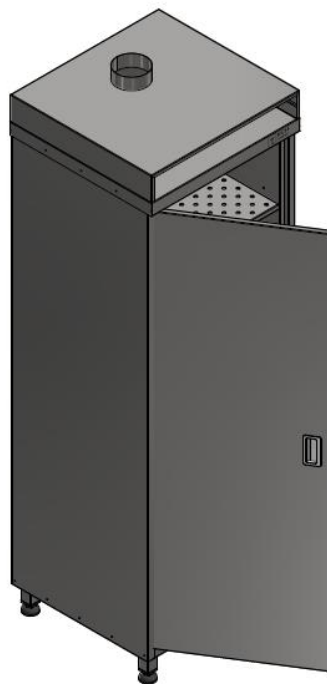

FLACONS ZERO



SAS TECH INTER ZA du Clos de Villarceaux. 78770 Thoiry. France.

Tél : 33 (0)1 34 94 20 40. Fax : 33(0)1 34 87 76 49. Email : sales@tech-inter.fr. site : www.tech-inter.fr
Siret n° : 39312254400058 – APE : 4652Z RCS Versailles : B393122544 N° TVA intracom : FR313931244544